


Avkobling av kateter

1

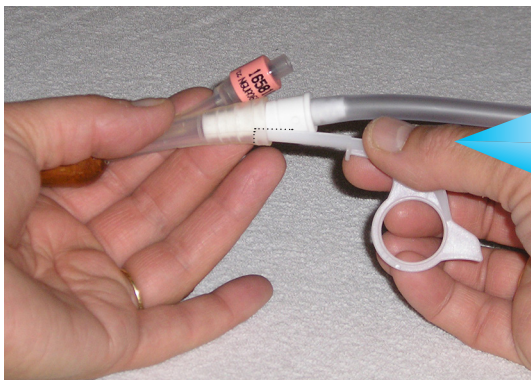


Del 1 av ec.input føres ca 15mm inn mellom kateter og nippel. Hvis ec.input føres for langt inn kan det bli litt trangt.

2




Del 2 av ec.input legges oppi del 1 og føres ca 5mm inn mellom kateter og nippel.

3

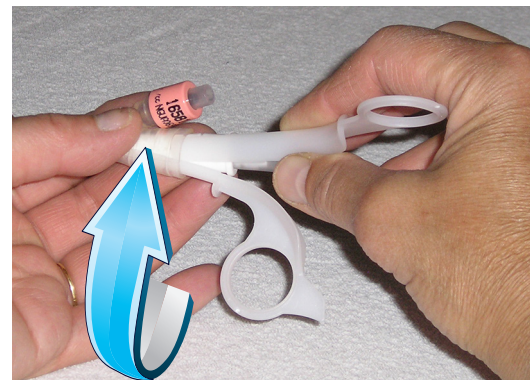


Del 2 av ec.input dreies deretter 180 grader i forhold til del 1.

4

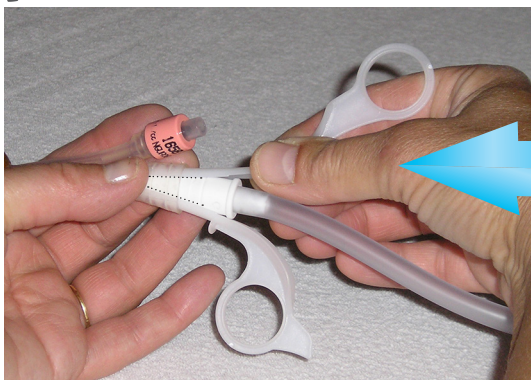


Før til slutt del 2 av ec.input videre inn ca 10 mm så den er like langt inn som del 1. Delene står nå rett overfor hverandre.

5

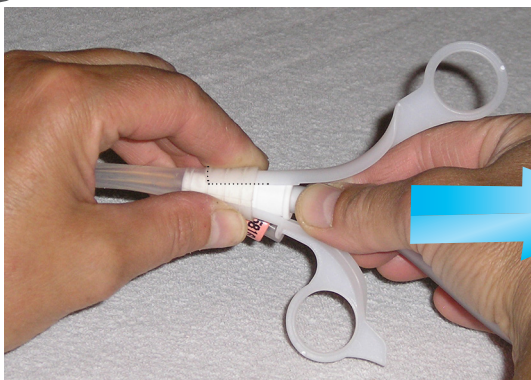

Hold fingrene fast over ec.input som vist på bildet. Slange/nippel dreies nå forsiktig samtidig som den trekkes ut.

6

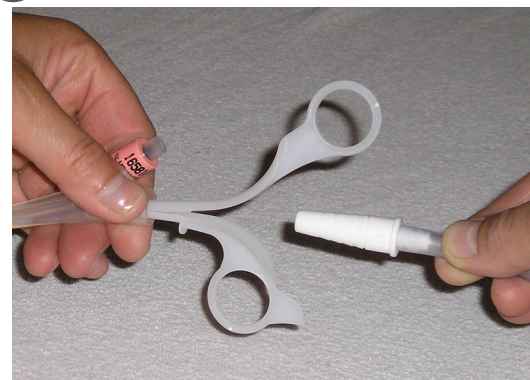

- for en friere hverdag!