

# Hvordan laste opp data fra pumpen med CareLink™ Personal - programvaren

Denne guiden viser fremgangsmåten som er beskrevet på side 43 i heftet «Kom i gang med Minimed™ 670G-systemet»

*TIPS! I søkefeltet (for programvare nede til venstre) skriv **Internett Explorer** og velg denne nettleseren eller Firefox om du har, da denne fungerer bedre enn feks Edge og Google Chrome.*

Gå til <https://carelink.minimed.eu>



Velg **Registrer deg nå**

Velg land og språk

Les bruksvilkårene for CareLink™ Personal

## CareLink™ Personal

### Registreringsskjema

\* - obligatorisk

For å registrere deg i CareLink Personal-programmet må du fylle ut informasjonen i registreringsskjemaet nedenfor. Nødvendig informasjon er markert med en stjerne. Klikk på *Send* når du har fylt ut skjemaet.

#### Påloggingsinformasjon

\*Brukernavn:  ?  
Et sterkt passord skal inneholde minst én stor bokstav, ett tall og ett spesialtegn.

\*Passord:  ?

\*Bekreft passord:

\*Sikkerhetsspørsmål: --Velg-- ?

\*Sikkerhetssvar:  ?

#### Pasientinformasjon

\*Fornavn:

Mellomnavn eller initial:

\*Etternavn:

\*Adresse 1:

Adresse 2:

\*Sted:

\* Postnummer:

Land: Norge

Kjønn: --Velg--


Opprett brukernavn og passord og legg inn all påkrevd informasjon

\*Telefon:   
+47 xx xx xx xx  
\*E-post:   
bruker@domene.no

Kontoen krever totrinnsverifisering. Dette bidrar til å beskytte informasjonen din.

\*Send verifiseringskode til e-postadressen ovenfor

\*Angi kode:

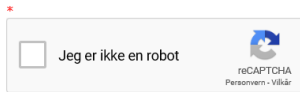

En totrinns bekreftelsesprosess gir ekstra beskyttelse for dine personlige opplysninger.

For å kunne fullføre må du legge inn en gyldig e-postadresse og når du blir bedt om det; legge inn autentiseringskoden som blir sendt til din e-postadresse for å få tilgang til kontoen din.

### CareLink™ Personal

Velkommen til CareLink™ Personal-programvaren for administrasjon av diabetesbehandling. Hensikten med dette nettbaserte systemet er å hjelpe deg med å hente inn informasjon fra de ulike verktøyene du bruker til å behandle din diabetes - insulinpumpen, den kontinuerlige glukosemonitoren, blodsuktermåleren/-målerne og loggboken - og organisere informasjonen i letteste diagrammer, kurver og tabeller. Disse rapportene kan hjelpe deg og legen/sykepleieren med å oppdage trender og annen informasjon som kan føre til bedre behandling og økt kontroll.



CareLink™-programvare fra Medtronic

CareLink Personal-programvaren har følgende funksjoner:

- Personlige behandlingsrapporter med den informasjonen du trenger

Enkelte apparater som støttes av dette systemet, leveres kanskje ikke i alle land hvor systemet er godkjent for bruk.

Det kan hende at CareLink™ Personal-programvaren for administrasjon av diabetesbehandling ikke er fullstendig i samsvar med relevante lover og forskrifter i alle land, for eksempel lover og forskrifter om personvern på Internett og overføring av personlige opplysninger via Internett.

Fordøppl vil bare personer som bor i [land der programvaren tilbys](#), få tillatelse til å registrere seg og bruke systemet.

Hvis du tidligere er registrert, men ikke bor i et av disse landene eller områdene må du åreblikkelig avslutte bruken av systemet inntil videre.

[personvernkløring](#) [vilkår for bruk](#) [kontakt oss](#) [vanlige spørsmål](#)

**Nå er alt tilrettelagt! Begynn i dag.**

**Allerede registrert? Logg deg på her:**

Brukernavn:

Passord:

[Glemt passordet?](#)

**Andre ressurser:**

- [MiniMed.com](#) (bare på engelsk)

Logg deg på med brukernavn og passord

### CareLink™ Personal

[Min info](#) [Innstillinger](#) [Hjelp](#) [Logg av](#)

**Hjem** **Loggbok** **Rapporter** **CareLink Connect**

**Velkommen tilbake, Beate Sorga.**

Siste vellykkede pålogging: 18. mars 2020 kl. 16:41

Siste bevegelser - de fem siste opplastingene

| Dato       | Utstyr                   | Serienummer |
|------------|--------------------------|-------------|
| 18.03.2020 | MiniMed 640G - 1511/1711 | NG1028433H  |

[Slik installerer du opplasteren](#)

[Last opp med Java-applet](#)


Du må ha en kabel eller annet tilkoblingsutstyr for å kunne laste opp data til systemet fra MiniMed-insulinpumpen eller blodsuktermåleren. Kontakt MiniMeds produktstøtte på (+47) 67103220 eller produsenten av blodsuktermåleren hvis du ikke har dette utstyret.

CareLink™ Personal har nå et nytt verktøy som du kan bruke til å laste opp data fra utstyr som støttes av Medtronic. Verktøyet er ikke avhengig av Java-programmer for nettleseren.

Klikk på «Slik installerer du opplasteren»




Klikk på lenken for å laste ned installasjonsprogrammet

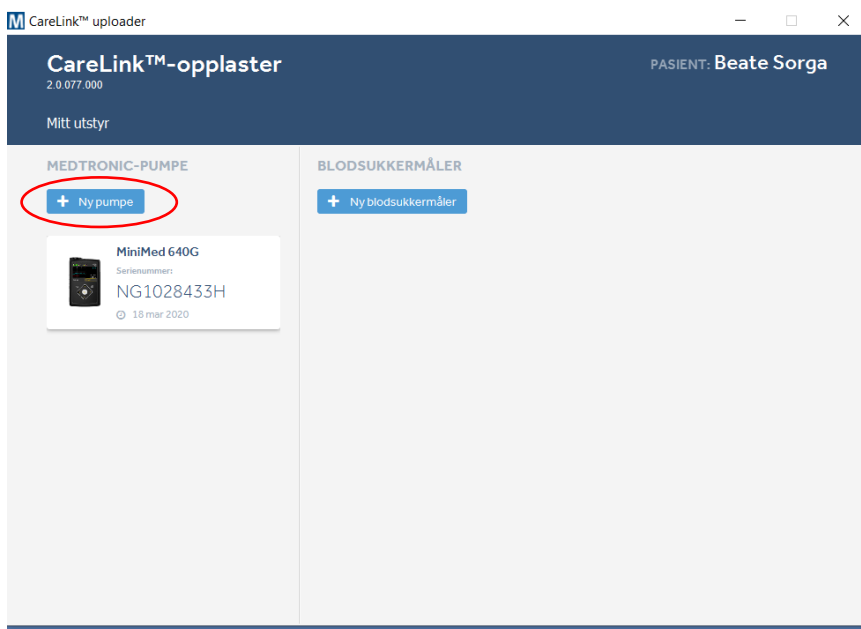

Velg «Ny pumpe».

I nest vindu blir du bedt om å legge inn Serienummer. Dette finner du på baksiden av pumpen under belteklipsen, eller under Status menyen -> Pumpe.


Neste gang du laster opp data velger du bilde av pumpen

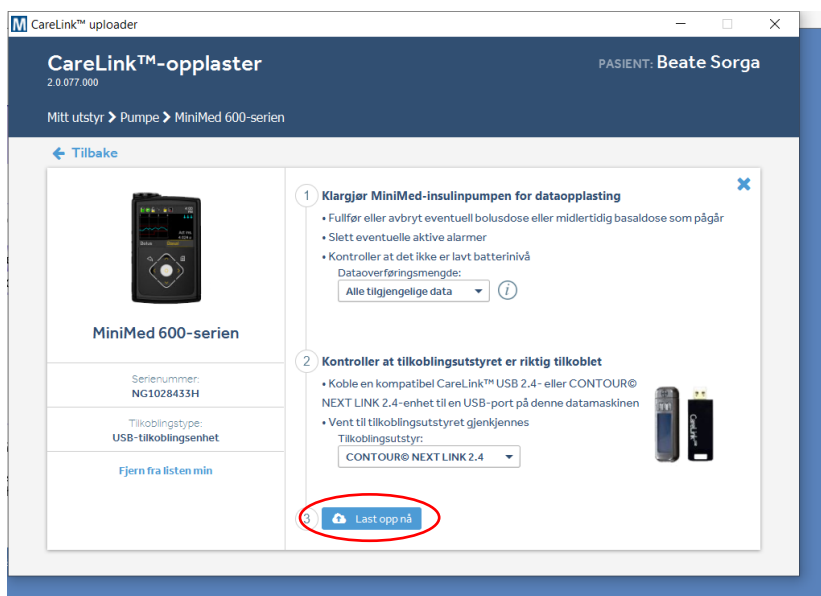

Les hvordan du klargjør insulinpumpen for dataopplasting.

Sett inn din **CONTOUR®NEXT LINK 2.4** blodsukkerapparat i USB porten.

Trykk deretter «Last opp nå»

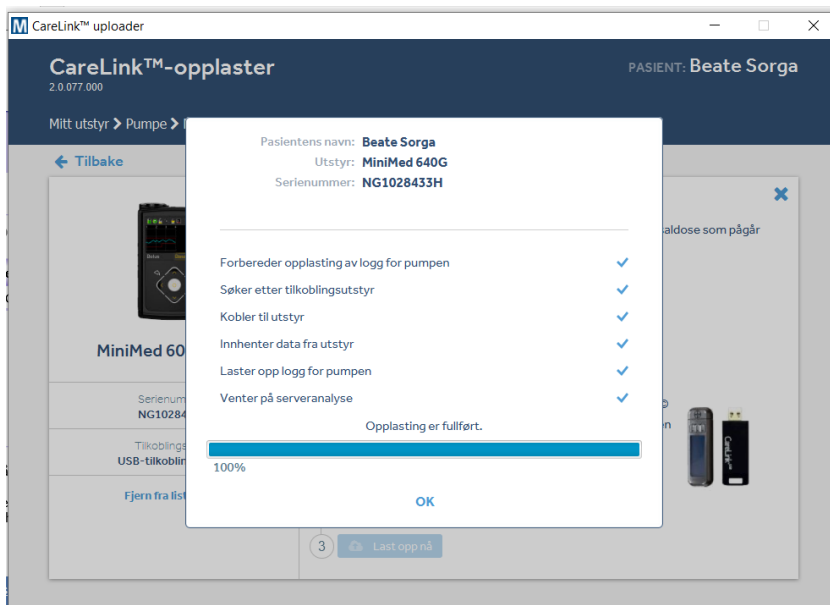

Når opplastninger er fullført, trykk **OK**

CareLink™ Personal

[Min info](#) [Innstillinger](#) [Hjelp](#) [Logg av](#)

Hjem Loggbok **Rapporter** CareLink Connect

**Velkommen tilbake, Beate Sorga.**

Siste vellykkede pålogging: 18. mars 2020 kl. 16:41

Siste bevegelser - de fem siste opplastingene [Oppdater](#)

| Dato       | Utstyr                   | Serienummer |
|------------|--------------------------|-------------|
| 19.03.2020 | MiniMed 640G - 1511/1711 | NG1028433H  |
| 18.03.2020 | MiniMed 640G - 1511/1711 | NG1028433H  |

[Slik installerer du opplasteren](#)

[Last opp utstyr](#)

[Last opp med Java-applet](#)

Du må ha en kabel eller annet tilkoblingsutstyr for å kunne laste opp data til systemet fra MiniMed-insulinpumpen eller blodsuktermåleren. Kontakt MiniMeds produktstøtte på (+47) 67103220 eller produsenten av blodsuktermåleren hvis du ikke har dette utstyret.

CareLink™ Personal har nå et nytt verktøy som du kan bruke til å laste opp data fra utstyr som støttes av Medtronic. Verktøyet er ikke avhengig av Java-programmer for nettleseren.

[Samtykke](#) - [Merknad om informasjonskapsler](#) - [Kontakt oss](#) - [Vanlige spørsmål](#) [Min info](#) - [Innstillinger](#) - [Hjelp](#) - [Logg av](#)

Klikk på fanen «Rapporter» øverst

File Edit View Favorites Tools Help

1. Velg periode: **2 uker** 1 måned 3 måneder Egen

06.03.2020 – 19.03.2020

2. Velg rapporter: Total = 0 rapport(er) **Lage rapporter**

**Grupper**

- Grupperte rapporter for fremgangen min og trendene mine** (mer informasjon...) Legg til listen  
Jeg ønsker å forstå mønstrene i glukosekontrollen min. Jeg ønsker å se gjennomsnittlig glukose og totalt insulinforbruk per dag.
- Grupperte rapporter for glukosenivåer forbundet med måltider** (mer informasjon...) Legg til listen  
Jeg ønsker å få oversikt over måltidsbolusen, glukosenivået etter at jeg har spist, og mengden mat jeg spiser.
- Grupperte rapporter for årsaker til høye og lave nivåer** (mer informasjon...) Legg til listen  
Jeg ønsker å forstå sammenhengen mellom aktiviteter eller hendelser og glukosenivåer fra dag til dag.
- Grupperte rapporter for pumpe uten sensor** (mer informasjon...) Legg til listen  
Jeg har en pumpe uten kontinuerlig glukosemåling, men jeg ønsker likevel å få oversikt over glukosenivåene og insulinforbruket.
- Rapport for pumpeinnstillingene mine** (mer informasjon...) Legg til listen  
Jeg ønsker å lagre innstillingene mine før jeg endrer dem. Jeg ønsker å ha oversikt over de gjeldende innstillingene mine.
- Grupperte rapporter for MM670G-systemet** (mer informasjon...) Legg til listen  
Jeg ønsker å se om glukosekontrollen min blir bedre, og hva jeg kan gjøre for å bli værende lenger i automodus.

**Enkeltrapporter**

1. Velg «**Grupperte rapporter for MM670G-systemet**» og
2. «**Daglige rapporter**» helt nederst under Enkeltrapporter. Velg dato(er)
3. Trykk deretter på «**Lage rapporter**» øvers til høyre

**Generell oversikt og episodeoversikt** (mer informasjon...) Fjern  
Observer glukosetrender og mønstre, og få rask oversikt over pumpe og CGM.  
**Ikke tilgjengelig for MM670G.**

**Respons** (mer informasjon...) Legg til listen  
Identifiser bedre adferd ved å få oversikt over hvordan du bruker pumpen.

**Oversikt over sensor og blodsuktermåler** (mer informasjon...) Fjern  
Observer sensorglukose- og blodsukkertrendene for hver time eller hvert måltid i løpet av dagen. Identifiser sammenhengen mellom glukose, insulin, mat og hendelser fra dag til dag.  
**Ikke tilgjengelig for MM670G.**

**Loggbok** (mer informasjon...) Legg til listen  
Sammenlign BS- og pumperegistreringer over dager og tidspunkter i et loggbokformat.

**Sammendrag av utstyrsinnstillinger** (mer informasjon...) Legg til listen  
Registrer alle de siste pumpeinnstillingene dine slik at de bevares.

**Daglige rapporter** (mer informasjon...) Legg til listen  
Feilsøk problemer eller kopier de beste resultatene ved å gjennomgå individuelle dager.

Siste 14 dager av det valgte datoområdet (14.03.2020 – 27.03.2020)

Velg dato(er)

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| lø | sø | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | ma | ti | on | to | fr |

Dataperiode / CSV

